

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА (МАК)

Chocolate Agar Plate

Подлога за изолација на *Neisseria gonorrhoeae* од примероци поврзани со хронични и акутни гонококни инфекции.

Опис на пакување:

Шифра на производ (пакување) REF	Опис	Примарна шифра за пакување:	Големина на пакување
PRM103V20	Подлогата е излиена во петриеви плочи од $\varnothing 90$	PRM103	20
PRM103V60			60
PRM103V240			240
PRM103M40	Подлогата е излиена во петриеви плочи од $\varnothing 50$		40

Упатства

Под асептични услови инокулирајте ја плочата со метод на површинско садење и инкубирајте под одредени услови.

Принцип и Интерпретација

Гонококите се захтевни организми со прецизни нутритивни и еколошки барања (5). Подлогата за култивација на гонокока, во идеални услови, во својата основа би требало да биде богата со хранливи материи, со додаток на крв, делумно или целосно лизирана. Дијагнозата и контролата на гонорејата се значително подобрени со подобрените лабораториски методи за откривање, изолација и проучување на *N. gonorrhoeae*.

Chocolate Agar се користи за изолација и култивирање на захтевните микроорганизми, особено *Neisseria* и *Haemophilus* видовите од различни клинички примероци (1, 2). Ензимскиот хидролизат на казеин и екстрактот од месо ги обезбедуваат изворите на азот кои се потребни за раст на захтевните организмите. Пченкарниот скроб ги неутрализира токсичните масни киселини кои може да се ослободат за време на растот на бактериите. Додатокот на витамин ги обезбедува неопходните фактори за раст, витамините, аминокиселините и коензимите (2). Дикалиум фосфатот и монокалиум фосфатот помагаат во одржување на рН вредноста на подлогата, додека натриум хлоридот ја одржува осмотската рамнотежа со што се одржува интегритетот на келијата.

Дополнителните суплемементи на подлогата, ги обезбедуваат факторите кои се потребни на захтевните организмите:

X-фактор (од хемоглобин) и V-фактор (NAD) (3, 4).

Контрола на Квалитет

Податоците и резултатите од контролата на квалитетот се дадени во сертификатот за анализа, за секоја серија.

Чување и Рок на употреба

Да се чува на температура од 2-8°C. Да се употреби пред истекот на датумот означен на налепницата.












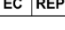
Мерки на Претпазливост

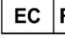
Овој производ не содржи опасни супстанции во концентрации кои се над пропишаните граници одредени со важечки законски регулативи, и затоа не е класифициран како опасен. Сепак, се препорачува да се постапува по упатствата наведени во безбедносниот лист за правилна употреба. Овој производ е наменет исклучиво за употреба во лабораториски услови, од страна на професионално обучен персонал. Не го употребувајте производот доколку примарното пакување е оштетено или производот не одговара на наведените карактеристики.

Отстранување на Отпад

Отстранувањето на отпадот мора да биде во согласност со важечките национални и локални регулативи. Секоја лабораторија е одговорна за ракување и отстранување на отпадот кој се создава во текот на работењето.

Симболи користени на етикети

	Ознака за Европска Сообразност		Оваа страна нагоре
	Ин витро дијагностичко медицинско средство (IVD)		Каталожки број
	Да не се изложува директно на сончева светлина		ЛОТ број
	Консултирајте го упатството за употреба		Рок на употреба
	Не употребувајте повторно		Ограничување на температурата
	Големина на пакување		Производител
	Овластен претставник во ЕУ		

	Salus Cons kft. 6722 Szeged, Bécsi krt 23, HUNGARY e-mail: office@saluscons.com
---	--

Литература

1. Carpenter C. M., Bucca M. A., Buck T. C., Casman E. P., Vhristensen C. W., Crowe E., Drew R., Hill J., Lankford L. E., Morton H. E., Peizer L. R., Shaw C. J., and Thayer J. D., 1949, Am. J. Syphil. Gonorrh. Venereal Diseases, 33:164.
2. Muench. Wochschr., 80:846:1933.
3. McLeod J. W., Cootes J. C., Happold F. C., Priestely D. P., Wheatley B., 1934, J. Path. Bacteriol., 39:221.
4. J. Infectious Diseases, 61:129:1937.
5. Am. J. Syphilis, 20:347:1936.
6. Am. J. Syphilis, 22:55:1938.
7. Seventh Annual Year book (1936-37) P.133, suppl., Am. J. Pub. Health. 27: no.3 : 1937.
8. Bull. Genitoinfectious diseases, Mass. State Health Dept., 2:1:1938.

Носител на решение за запишување во Регистарот на Медицински средства и Дистрибутер за Република Северна Македонија:

АДРИАМЕД ДОО

ул. Виктор Иго бр. 4, 1000 Скопје
тел. +389 2 3229-600; +389 2 3229-611
e-mail: adriamed@adriamed.com.mk
www.adriamed.mk